

Neues Einlagenprinzip entlastet die gesamte Plantarfaszie – zur Einzel- und Kombinationsversorgung

EsConclusion®

Indikationen:


- ▶ Fersensporn
- ▶ Plantarfaszienruptur
- ▶ Arthrose Großzehengrundgelenk



Neuartiger Entlastungsleisten für das gesamte Entzündungsfeld


Druckfreilegung der gesamten Plantarfaszie

Weichbettung im Fersenbereich

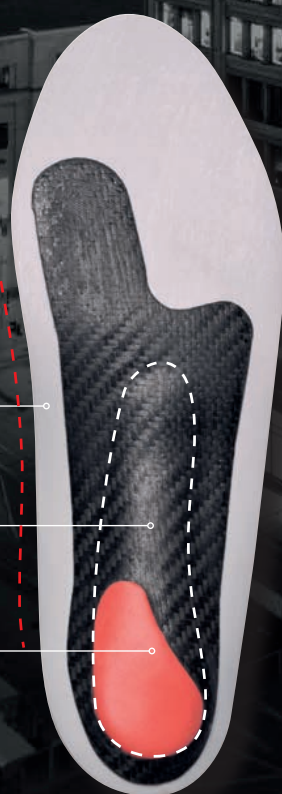

EsConclusion FSP

Die Fersenspornbehandlung mit Einlagenrohlingen wird traditionell mit druckentlastenden Polsterungen im Bereich des Sporns behandelt. Der Patient erhält eine Entlastung des Auftritts und wird dadurch im Wesentlichen schmerzbefreit. Da vielfach mit der, durch den Sporn verursachten Entzündung unter dem Calkanäus auch eine Plantarfaszierruptur einhergeht – und das Entzündungsfeld bis in das Längsgewölbe des Fußes ausstrahlt, gibt es jetzt eine deutliche Entlastung, die auf der richtigen, anatomischen Bettung der Plantarfaszie beruht.

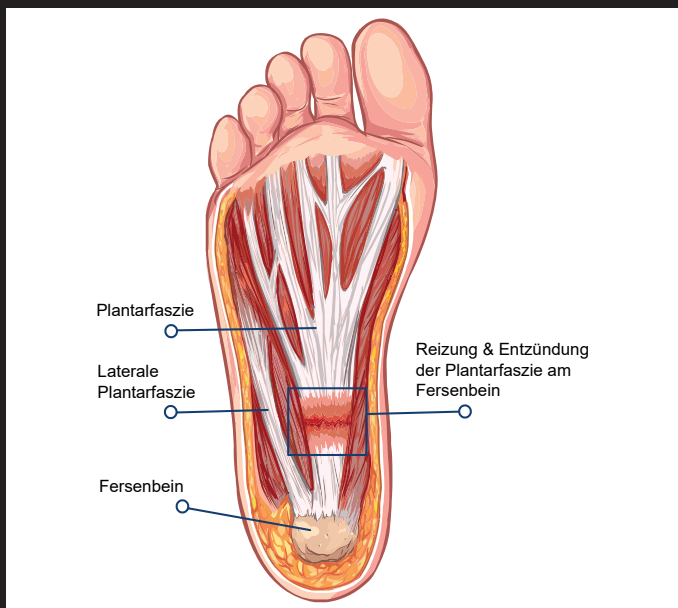

Die neue Einlagenserie bietet hier zwei wesentlich professionellere Versorgungsansätze, die zum einen den Belastungsdruck auf das innere und äußere Längsgewölbe umverteilt und zum anderen durch eine anatomische Lagerung der Plantarfaszie den Spannungsbogen der Sehne reduziert und somit eine deutlich bessere Stoffwechselversorgung und eine dementsprechende Schmerzbefreiung zur Folge hat.

Diese Kombination unterstützt den schnelleren Prozess hin zu Schmerzbefreiung des Patienten.

Reihenuntersuchungen belegen diese Funktion: nach 2–3 Wochen waren die akuten Beschwerden behoben und die Qualität und Freude an der Bewegung zurück erlangt. Multifunktion wird durch diese Art von Versorgung garantiert, da neben den meist vorhandenen Beschwerden, die der Fersensporn verursacht, auch die klassischen Fußdeformationen optimal versorgt werden können. Neu ist auch die technische Umsetzung der Versorgungsphilosophie auf die Carboneinlagentechnologie.

Dadurch ist neben den vorgenannten Indikationen auch die Gelenkarthrose des Großzehengrundgelenkes sehr gut zu behandeln! Die bereits bekannte EsCoRigi-Tec-Einlagentechnik ist durch die Plantarfasziennbettung technisch ergänzt worden. Der Fuß wird in seinen Gelenken teilversteift. Durch die Bewegungsreduktion ist eine sofortige Schmerzreduktion feststellbar.

Um eine Vielzahl von Therapiekonzepten durch den Orthopädie-Techniker umsetzbar zu machen, haben wir diverse Trägermaterialien vordefiniert.

Diese stehen dem Orthopädiefachmann zur individuellen Auswahl seiner Versorgungsstrategie bis hin zur ESD-Versorgung im Arbeitssicherheitsschuh, zur Verfügung.

EsConclusion FSP



EsConclusion FSP I Carbon

schmale Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino rot auf Nora-Lunasoft weiss

Art.-Nr. 119422-10004
Größen 35-48



EsConclusion FSP II Carbon

breite Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino grün auf EsCo SoftFlex grün

Art.-Nr. 119522-10001
Größen 35-48



EsConclusion FSP III Carbon

schmale Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino rot auf Nora-Lunasoft weiss

Art.-Nr. 119422-10005
Größen 35-48



EsConclusion FSP IV Carbon

breite Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino grün auf EsCo SoftFlex grün

Art.-Nr. 119522-10002
Größen 35-48


EsConclusion FSP



EsConclusion FSP I HighFlex

schmale Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino schwarz auf Dynoform rot

Art.-Nr. 415222-10000
Größen 35-48

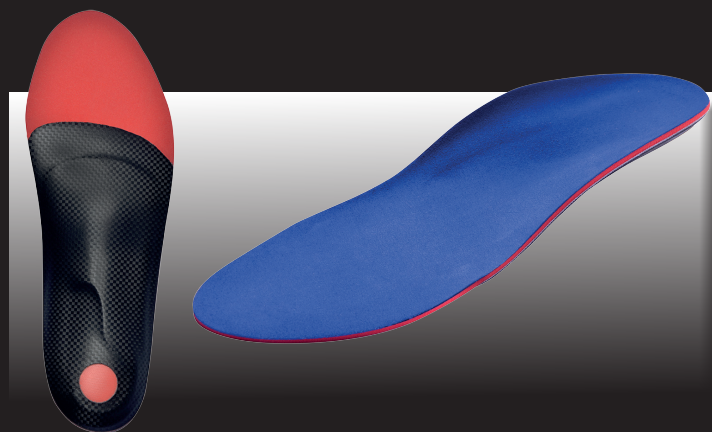

EsConclusion FSP II HighFlex

breite Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino blau auf Dynoform rot


Art.-Nr. 415322-10000
Größen 35-48



EsConclusion FSP I EsCombine

schmale Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino schwarz auf Dynoform rot

Art.-Nr. 124222-10000
Größen 35-48

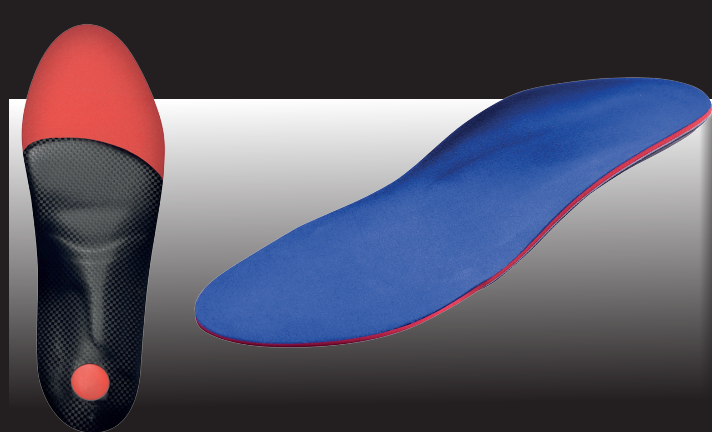

EsConclusion FSP II EsCombine

breite Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino blau auf Dynoform rot

Art.-Nr. 124322-10000
Größen 35-48


EsConclusion FSP



EsConclusion FSP I Soft

schmale Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino schwarz auf Dynoform rot

Art.-Nr. 361222-10000
Größen 35-48

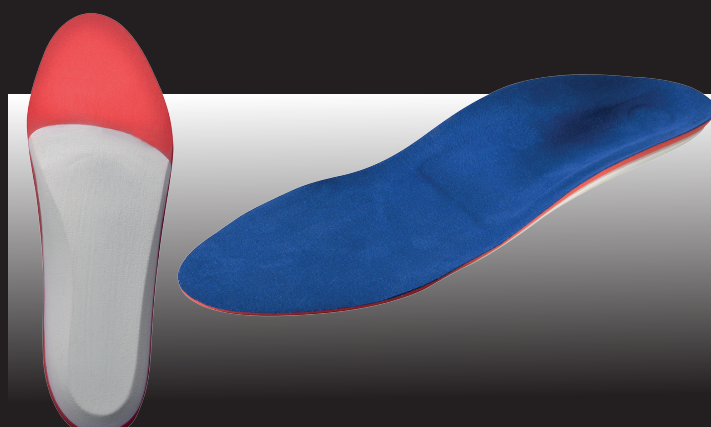


EsConclusion FSP II Soft

breite Bettung, mittelbreit, langsohlig,
Decke Clarino blau auf Dynoform rot

Art.-Nr. 361322-10000
Größen 35-48


EsConclusion HighFlex

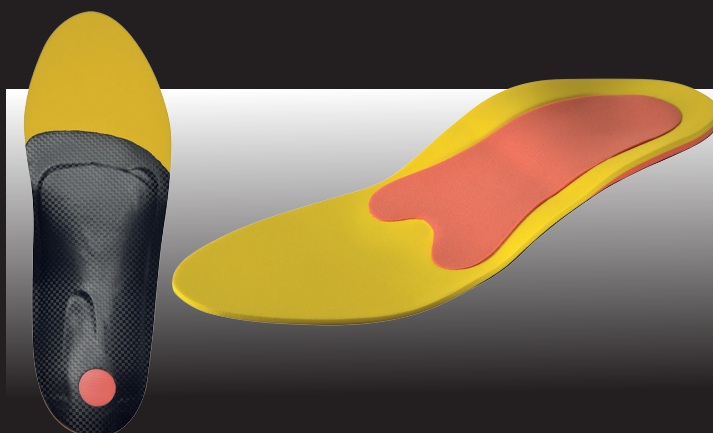

EsConclusion HighFlex

mittelbreit, langsohlig, mit gepolsterter Fersen-
sporn- und Plantarfaszienaussparung

Art.-Nr. 414022-11229
Größen 35-48

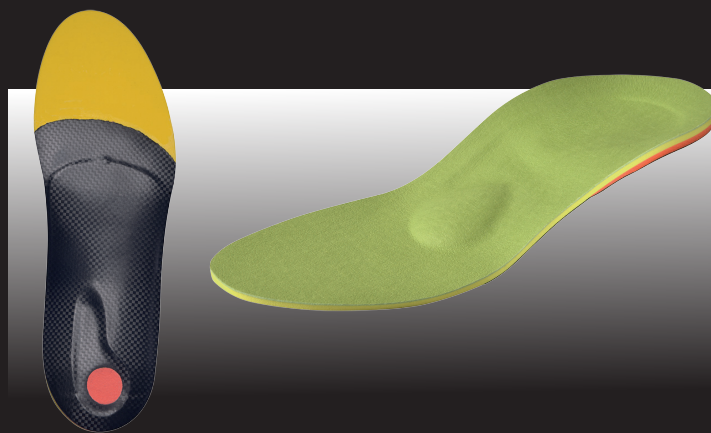


EsConclusion HighFlex

mittelbreit, langsohlig, mit tiefergelegter, ge-
polsterter Fersensporn- und Plantarfaszienauss-
sparung, Decke onSteam grün auf EsCo SoftFlex
gelb

Art.-Nr. 414022-10673
Größen 35-48


EsConclusion HighFlex

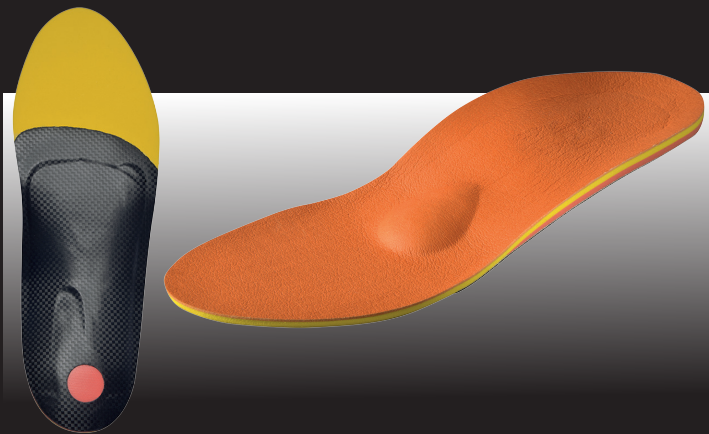

EsConclusion HighFlex

mittelbreit, langsohlig, mit Fersensporn- und Plantarfaszienausparung, plan, Decke onSteam orange auf EsCo SoftFlex gelb, Gummipelotte


Art.-Nr. 414022-10480
Größen 35-48

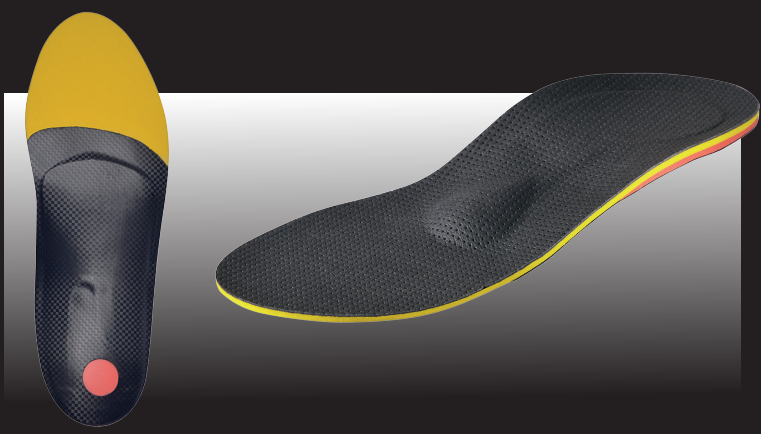

EsConclusion HighFlex

mittelbreit, langsohlig, mit gepolsterter Fersensporn- und Plantarfaszienausparung, erhaben, Decke onSteam anthrazit anperforiert auf EsCo SoftFlex gelb, Gummipelotte

Art.-Nr. 414022-10305
Größen 35-48

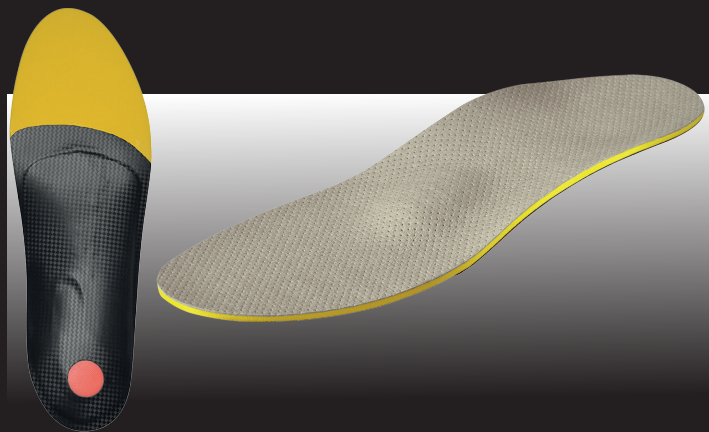

EsConclusion HighFlex

mittelbreit, langsohlig, mit gepolsterter Fersenspornausparung, Decke onSteam Stone anperforiert auf EsCo SoftFlex gelb, Gummipelotte

Art.-Nr. 414022-10455
Größen 35-48